

## Gebrauchsanweisung / Produktsicherheitsinformationen zum Artikel MED02

### Artikel MED02 bestehend aus

- 1 x Steckschloss Sockel (Metall) und Verschlussknopf
- 1 x Steckschlüsselschlüssel



### Verwendungszweck Steckschloss

Zum Sichern von Sicherheitsreißverschlüssen und anderen geeigneten Bandagen.

### Verwendungszweck Steckschlüssel

Zum Öffnen des Steckschlusses

### Öffnen des Steckschlusses

Zum Öffnen des Steckschlusses den Schlüssel in die Öffnungen des Verschlussknopfes bis zur Entriegelung eindrücken und den Verschlussknopf abheben. Das Steckschloss ist geöffnet.

### Verschließen des Steckschlusses

Zum Schließen des Steckschlusses wird der der Verschlussknopf auf den Schaft gedrückt bis ein "Klick" spürbar ist. Das Steckschloss ist verschlossen. Überprüfung: Steckknopf lässt sich nicht vom Schaft abheben.

### Pflegeanleitung

Schlösser und Sockel stets vor der Wäsche des Kleidungsstückes oder Bandagen entfernen. Socken und Schlüssel mit feuchtem Tuch reinigen / desinfizieren, keinesfalls in Feuchtigkeit tauchen. Mitgewaschene Schlösser und Schlüssel verlieren Ihre Funktion ganz oder teilweise.

### Warnhinweise

- Vor jeder Nutzung muss das Schloss auf Funktion geprüft werden
- Schlösser nicht in Feuchtigkeit tauchen
- Sockel und Verschlussknopf auf Beschädigung / Abnutzung überprüfen
- Beim Verschluss des Schlosses muss der Verschlussknopf einrasten und darf sich nicht abziehen lassen.
- Für das Öffnen muss eine Beweglichkeit zwischen dem oberen Einrastpunkt und unterer Sockelplatte sichergestellt sein, Steckschloss darf beim Öffnen nicht unter Zug stehen.
- Produkt nur zum bestimmungsmäßigen Verwendungszweck einsetzen
- Gebrauchsanweisung vor Verwendung sorgfältig lesen und griffbereit ablegen
- Vor Kindern fernhalten, Produkt enthält Kleinteile